



MEISINGER
IMPLANTS

CHIRURGISCHES VERFAHREN

OKTAGON[®]
TISSUE LEVEL






MEISINGER
IMPLANTS

OKTAGON®

TISSUE LEVEL

VERFAHREN ZUR IMPLANTATINSERTION

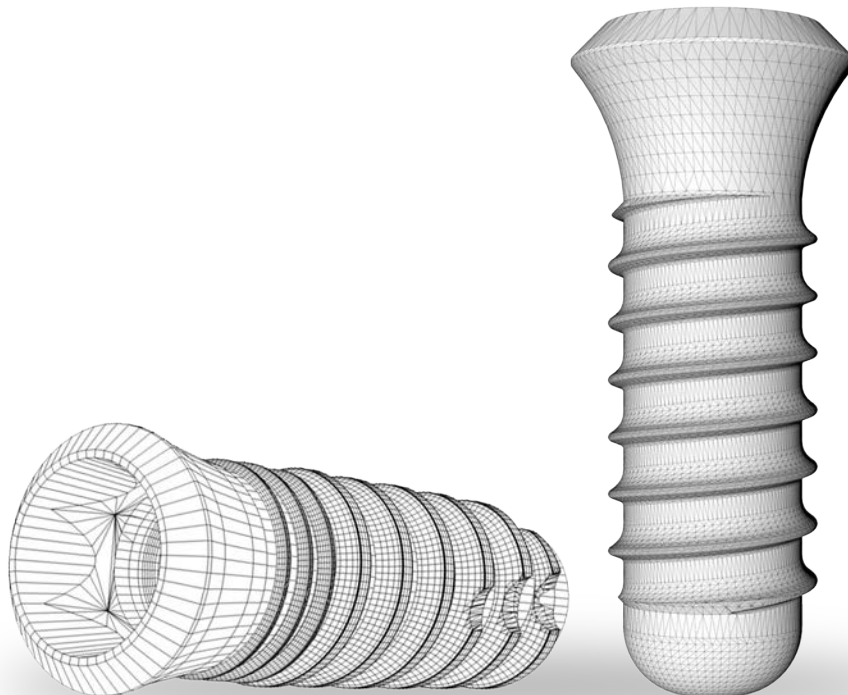

Diese Guideline ist eine Beschreibung der wichtigsten Schritte für die chirurgische Behandlung und Vorgehensweise für das OKTAGON® Implantatsystem. Es wird vorausgesetzt, dass der Anwender mit der Implantologie intensiv vertraut ist.

- ▶ Der Anwender ist verpflichtet, das Produkt gemäß der Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Implantate der Meisinger Implants GmbH zu verwenden
- ▶ Es muss für ein steriles Umfeld gesorgt werden
- ▶ Jeder Bohrvorgang muss unter stetiger Kühlung erfolgen
- ▶ Bei intraoraler Anwendung ist darauf zu achten, dass die Instrumente gegen Aspiration oder Herunterfallen gesichert sind
- ▶ weitere Information finden Sie unter <https://www.meisingerimplants.com>

OKTAGON® TL | IMPLANT SITE PREPARATION

TISSUE LEVEL RP | Implantat Ø 3.3 mm

Schritt 1 - Implantattyp

Die Auswahl vom Implantattyp und Implantatdurchmesser sollte vor der ersten Bohrung erfolgen. Die Gewebetiefe wird mit einer Gewebesonde gemessen.

Schritt 2A/2B - Basispräparation

Eröffnung der Gingiva mittels Schnitt zur Erzeugung eines Lappens, so dass eine visuelle Inspektion des Alveolarkamms gewährleistet ist.

Schritt 3 - Markierung der Implantatposition

Zur Markierung der Implantatposition kann der Rosenbohrer Ø 2.2 mm (Ref. 31061) mit max. Drehzahl von 800 min⁻¹ verwendet werden. Optional kann auch der Pilotbohrer Ø 1.54 mm (Ref. 11594) mit max. Drehzahl von 600 min⁻¹ verwendet werden.

Schritt 4 - Bohrung

Die erste Osteotomie wird mit dem Spiralbohrer Ø 2.2 mm (Ref. 38120) bei einer maximalen Drehzahl von 800 min⁻¹ bis zur entsprechenden Präparationstiefe gebohrt.

Schritt 5 - Ausrichtung und Tiefe prüfen

Mit dem Ausrichtungsstift Ø 2.2 mm (Ref. 64566) wird die Implantatachse überprüft und ggf. können Winkelosteotomiekorrekturen während des nachfolgenden Bohrschrittes durchgeführt werden.

Schritt 6 - Bohrung

Bohren Sie mit dem Spiralbohrer Ø 2.8 mm (Ref. 38149) auf die richtige Insertionstiefe bei einer max. Drehzahl von 600 min⁻¹.

Schritt 7 - Ausrichtung und Tiefe prüfen



Die korrekte Insertionstiefe wird mit der Tiefenmesslehre Ø 2.2/2.8 mm (Ref. 64567) kontrolliert.

Schritt 8 - Profilbohrer


Verwenden Sie den Profilbohrer Ø 3.3 mm (Ref. 38137) bei einer max. Drehzahl von 300 min⁻¹ um den koronalen Teil des Implantatbetts zu formen.

Schritt 9 - Gewindeschneider

Verwenden Sie den Gewindeschneider Ø 3.3 mm (Ref. 95270) bei einer max. Drehzahl von 15 min⁻¹. Bei kompaktem Knochen muss der Gewindeschneider verwendet werden.

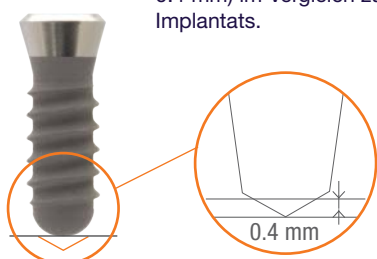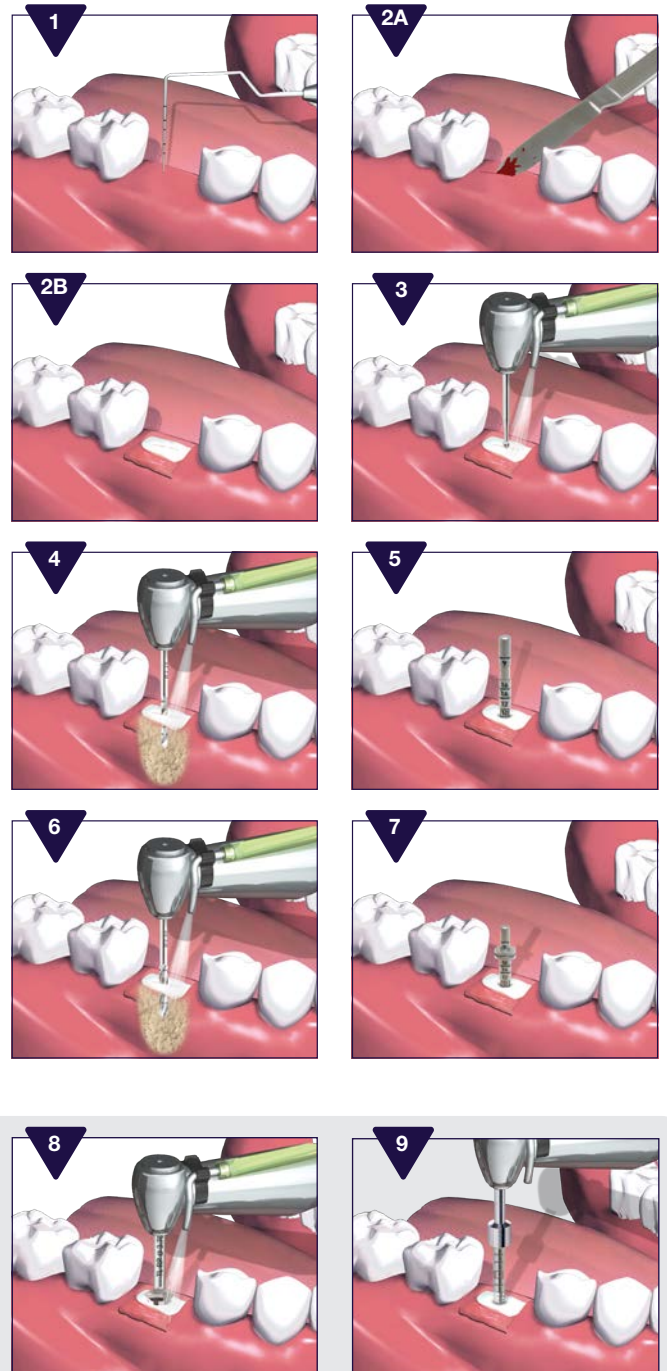

Die Spitzen der Spiralbohrer Ø 2.2/2.8 mm haben eine apikale Überlänge (bis zu 0.4 mm) im Vergleich zur Insertionstiefe des Implantats.

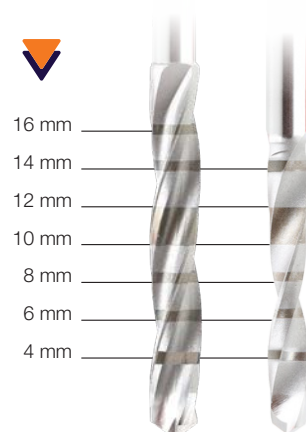



TISSUE LEVEL RP | Implantat Ø 3.75 mm

Schritt 1 - Implantattyp

Die Auswahl vom Implantattyp und Implantatdurchmesser sollte vor der ersten Bohrung erfolgen. Die Gewebetiefe wird mit einer Gewebesonde gemessen.

Schritt 2A/2B - Basispräparation

Eröffnung der Gingiva mittels Schnitt zur Erzeugung eines Lappens, so dass eine visuelle Inspektion des Alveolarkamms gewährleistet ist.

Schritt 3 - Markierung der Implantatposition

Zur Markierung der Implantatposition kann der Rosenbohrer Ø 2.2 mm (Ref. 31061) mit max. Drehzahl von 800 min⁻¹, unter Kühlung verwendet werden. Optional kann auch der Pilotbohrer Ø 1.54 mm (Ref. 11594) verwendet werden.

Schritt 4 - Bohrung

Die erste Osteotomie wird mit dem Spiralbohrer Ø 2.2 mm (Ref. 38120) bei einer maximalen Drehzahl von 800 min⁻¹ bis zur entsprechenden Präparationstiefe gebohrt.

Schritt 5 - Ausrichtung und Tiefe prüfen

Mit dem Ausrichtungsstift Ø 2.2 mm (Ref. 64566) wird die Implantatachse überprüft und ggf. können Winkelosteotomiekorrekturen während des nachfolgenden Bohrschrittes durchgeführt werden.

Schritt 6 - Bohrung

Bohren Sie mit dem Spiralbohrer Ø 2.8 mm (Ref. 38149) auf die richtige Insertionstiefe bei einer max. Drehzahl von 600 min⁻¹.

Schritt 7 - Ausrichtung und Tiefe prüfen

Die korrekte Insertionstiefe wird mit der Tiefenmesslehre Ø 2.2/2.8 mm (Ref. 64567) kontrolliert.

Schritt 8 - Bohrung

Bohren Sie mit dem Spiralbohrer Ø 3.25 mm (Ref. 38130) auf die richtige Insertionstiefe bei einer max. Drehzahl von 500 min⁻¹.

Schritt 9 - Überprüfung der Tiefe





Die korrekte Insertionstiefe wird mit der Tiefenmesslehre Ø 3.25 mm (Ref. 64568) kontrolliert.

Schritt 10 - Profilbohrer

Verwenden Sie den Profilbohrer Ø 3.75 mm (Ref. 38132) bei einer max. Drehzahl von 300 min⁻¹ um den koronalen Teil des Implantatbetts zu formen.

Schritt 11 - Gewindeschneider

Verwenden Sie den Gewindeschneider Ø 3.75 mm (Ref. 38134) bei einer max. Drehzahl von 15 min⁻¹. Bei kompaktem Knochen muss der Gewindeschneider verwendet werden.

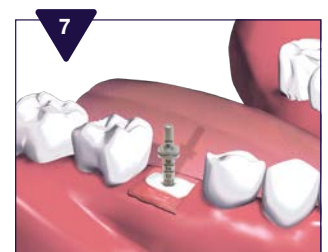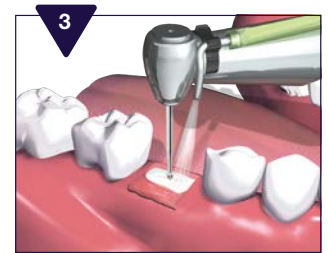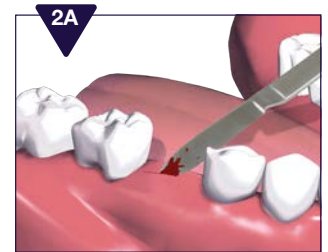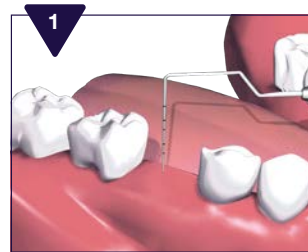

OKTAGON® TL | PRÄPARATION DES IMPLANTATBETTS



TISSUE LEVEL RP | Implantat Ø 4.1 mm

Schritt 1 - Implantattyp

Die Auswahl vom Implantattyp und Implantatdurchmesser sollte vor der ersten Bohrung erfolgen. Die Gewebetiefe wird mit einer Gewebesonde gemessen.

Schritt 2A/2B - Basispräparation

Eröffnung der Gingiva mittels Schnitt zur Erzeugung eines Lappens, so dass eine visuelle Inspektion des Alveolarkamms gewährleistet ist.

Schritt 3 - Markierung der Implantatposition

Zur Markierung der Implantatposition kann der Rosenbohrer Ø 2.2 mm (Ref. 31061) mit max. Drehzahl von 800 min⁻¹, unter Kühlung verwendet werden. Optional kann auch der Pilotbohrer Ø 1.54 mm (Ref. 11594) verwendet werden.

Schritt 4 - Bohrung

Die erste Osteotomie wird mit dem Spiralbohrer Ø 2.2 mm (Ref. 38120) bei einer maximalen Drehzahl von 800 min⁻¹ bis zur entsprechenden Präparationstiefe gebohrt.

Schritt 5 - Ausrichtung und Tiefe prüfen

Mit dem Ausrichtungsstift Ø 2.2 mm (Ref. 64566) wird die Implantatachse überprüft und ggf. können Winkelosteotomiekorrekturen während des nachfolgenden Bohrschrittes durchgeführt werden.

Schritt 6 - Bohrung

Bohren Sie mit dem Spiralbohrer Ø 2.8 mm (Ref. 38149) auf die richtige Insertionstiefe bei einer max. Drehzahl von 600 min⁻¹.

Schritt 7 - Ausrichtung und Tiefe prüfen

Die korrekte Insertionstiefe wird mit der Tiefenmesslehre Ø 2.2/2.8 mm (Ref. 64567) kontrolliert.

Schritt 8 - Bohrung

Bohren Sie mit dem Spiralbohrer Ø 3.5 mm (Ref. 38135) auf die richtige Insertionstiefe bei einer max. Drehzahl von 500 min⁻¹.

Schritt 9 - Überprüfung der Tiefe





Die korrekte Insertionstiefe wird mit der Tiefenmesslehre Ø 3.5 mm (Ref. 64569) kontrolliert.

Schritt 10 - Profilbohrer

Verwenden Sie den Profilbohrer Ø 4.1 mm (Ref. 38147) bei einer max. Drehzahl von 300 min⁻¹ um den koronalen Teil des Implantatbetts zu formen.

Schritt 11 - Gewindeschneider

Verwenden Sie den Gewindeschneider Ø 4.1 mm (Ref. 95271) bei einer max. Drehzahl von 15 min⁻¹. Bei kompaktem Knochen muß der Gewindeschneider verwendet werden.

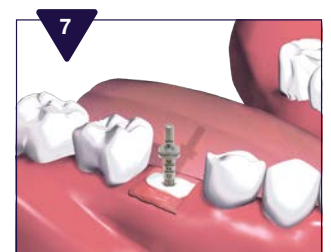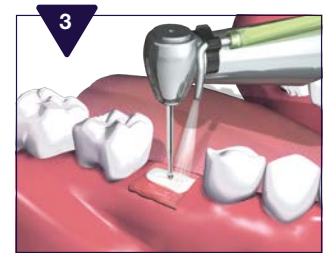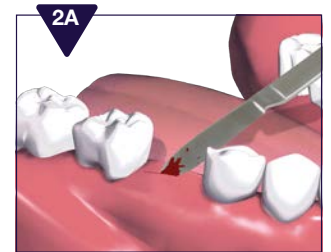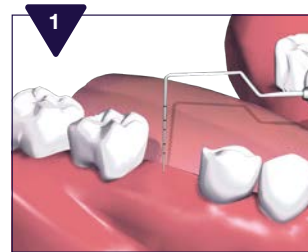



TISSUE LEVEL RP/WP | Implantat Ø 4.8 mm

Schritt 1 - Implantattyp

Die Auswahl vom Implantattyp und Implantatdurchmesser sollte vor der ersten Bohrung erfolgen. Die Gewebetiefe wird mit einer Gewebesonde gemessen.

Schritt 2A/2B - Basispräparation

Eröffnung der Gingiva mittels Schnitt zur Erzeugung eines Lappens, so dass eine visuelle Inspektion des Alveolarkamms gewährleistet ist.

Schritt 3 - Markierung der Implantatposition

Zur Markierung der Implantatposition kann der Rosenbohrer Ø 2.2 mm (Ref. 31061) mit max. Drehzahl von 800 min⁻¹, unter Kühlung verwendet werden. Optional kann auch der Pilotbohrer Ø 1.54 mm (Ref. 11594) verwendet werden.

Schritt 4 - Bohrung

Die erste Osteotomie wird mit dem Spiralbohrer Ø 2.2 mm (Ref. 38120) bei einer maximalen Drehzahl von 800 min⁻¹ bis zur entsprechenden Präparationstiefe gebohrt.

Schritt 5 - Ausrichtung und Tiefe prüfen

Mit dem Ausrichtungsstift Ø 2.2 mm (Ref. 64566) wird die Implantatachse überprüft und ggf. können Winkelosteotomiekorrekturen während des nachfolgenden Bohrschrittes durchgeführt werden.

Schritt 6 - Bohrung

Bohren Sie mit dem Spiralbohrer Ø 2.8 mm (Ref. 38149) auf die richtige Insertionstiefe bei einer max. Drehzahl von 600 min⁻¹.

Schritt 7 - Ausrichtung und Tiefe prüfen

Die korrekte Insertionstiefe wird mit der Tiefenmesslehre Ø 2.8 mm (Ref. 64567) kontrolliert.

Schritt 8 - Bohrung

Bohren Sie mit dem Spiralbohrer Ø 3.5 mm (Ref. 38135) auf die richtige Insertionstiefe bei einer max. Drehzahl von 500 min⁻¹.

Schritt 9 - Überprüfung der Tiefe

Die korrekte Insertionstiefe wird mit der Tiefenmesslehre Ø 3.5 mm (Ref. 64569) kontrolliert.

Schritt 10 - Bohrung

Bohren Sie mit dem Spiralbohrer Ø 4,2 mm (Ref. 38151) auf die richtige Insertionstiefe bei einer max. Drehzahl von 500 min⁻¹.

Schritt 11 - Überprüfung der Tiefe


Die korrekte Insertionstiefe wird mit der Tiefenmesslehre Ø 4.2 mm (Ref. 64570) kontrolliert.

Schritt 12 - Profilbohrer

Beim Bohren in dichtem Knochen ist der Profilbohrer Ø 4.8 mm (Ref. 93738) für das zu setzende WP Implantat zu verwenden. Für RP ist der Profilbohrer nicht erforderlich.

Schritt 13 - Gewindeschneider

Bei dichtem Knochen, ist der Gewindeschneider Ø 4.8 mm (Ref. 95272) zu verwenden.

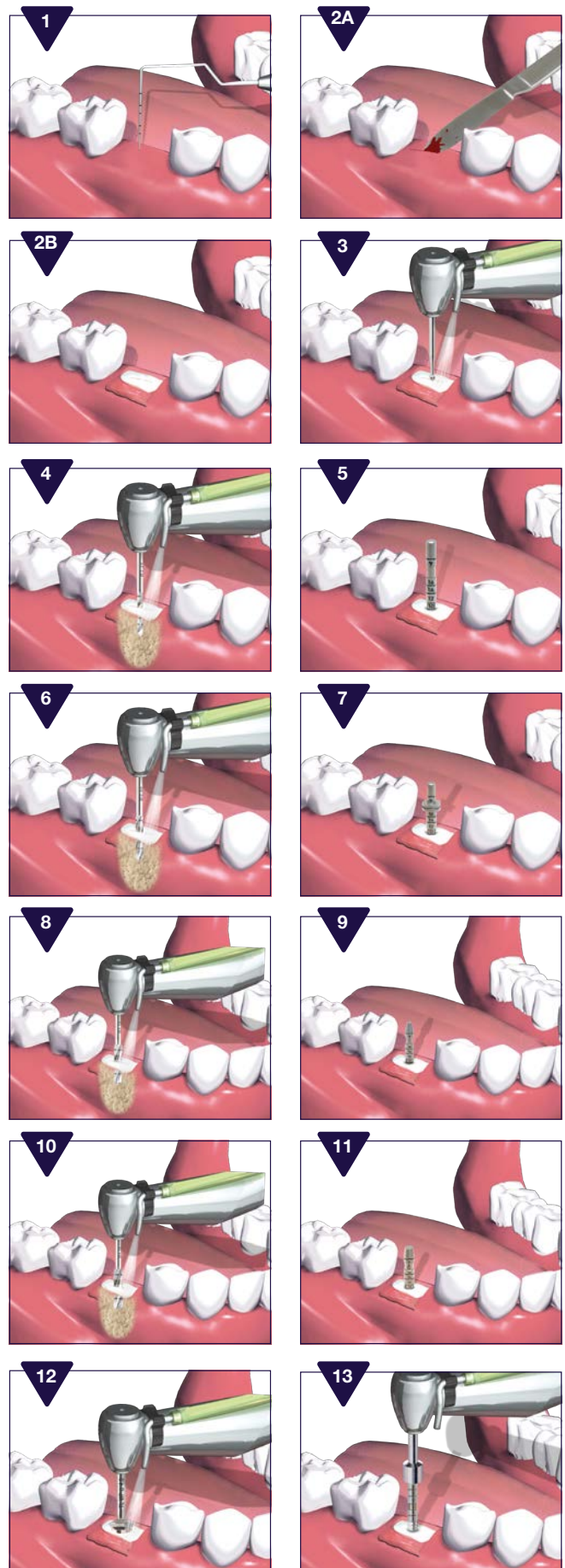

OKTAGON® TL | PRÄPARATION DES IMPLANTATBETTS



TISSUE LEVEL RP CONICAL | Implant Ø 4.1 mm

Schritt 1 - Implantat Länge 8 mm

Die Auswahl vom Implantattyp, Implantatdurchmesser und **Implantatlänge** sollte vor der ersten Bohrung erfolgen. Die Gewebetiefe wird mit einer Gewebesonde gemessen.

Schritt 2A/2B - Basispräparation

Eröffnung der Gingiva mittels Schnitt zur Erzeugung eines Lappens, so dass eine visuelle Inspektion des Alveolarkamms gewährleistet ist.

Schritt 3 - Markierung der Implantatposition

Zur Markierung der Implantatposition kann der Rosenbohrer Ø 2.2 mm (Ref. 31061) mit max. Drehzahl von 800 min⁻¹, unter Kühlung verwendet werden. Optional kann auch der Pilotbohrer Ø 1.54 mm (Ref. 11594) verwendet werden.

Schritt 4 - Bohrung

Die erste Osteotomie wird mit dem Spiralbohrer Ø 2.2 mm (Ref. 38120) bei einer maximalen Drehzahl von 800 min⁻¹ bis zur entsprechenden Präparationstiefe gebohrt.

Schritt 5 - Ausrichtung und Tiefe prüfen





Mit dem Ausrichtungsstift Ø 2.2 mm (Ref. 64566) wird die Implantatachse überprüft und ggf. können Winkelosteotomiekorrekturen während des nachfolgenden Bohrschrittes durchgeführt werden.

Schritt 6 - Bohrung

Wählen Sie den CONICAL Spiralbohrer Ø 2.8/3.7 mm (Ref. 38155) aus. Bohren Sie mit einer max. Drehzahl von 500 min⁻¹ bis zur Tiefenmarkierung auf dem Bohrer.

Schritt 7 - Überprüfung der Tiefe

Prüfen der Insertionstiefe mit der Tiefenmesslehre Ø 2.2/2.8 mm (Ref. 64567).

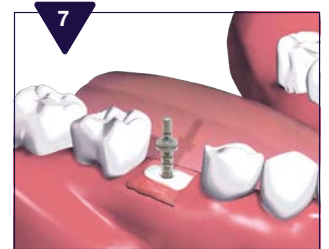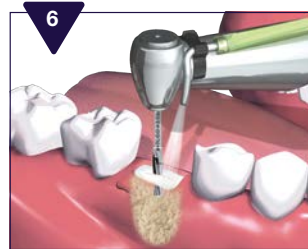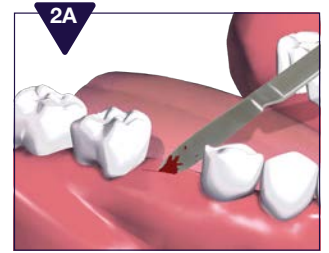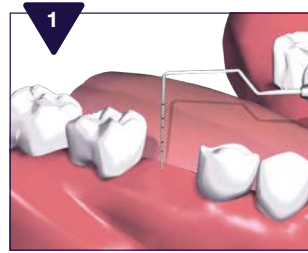


WICHTIG Die Spiralbohrer und Gewindeschneider sind entsprechend der Implantatlänge zu verwenden.

Schritt 8 - Profilbohrer

Verwenden Sie den Profilbohrer Ø 4.1 mm (Ref. 38153) bei einer max. Drehzahl von 300 min⁻¹ um den koronalen Teil des Implantatbetts zu formen.

Schritt 9 - Gewindeschneider

Verwenden Sie den der Implantatlänge entsprechenden Gewindeschneider Ø 4.1 mm. Bei kompaktem Knochen muss der Gewindeschneider verwendet werden.

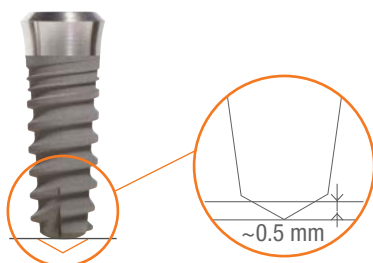

WICHTIG

Für CONICAL Implantate sind ausschließlich CONICAL Instrumente zu verwenden.

Die Spitzen der CONICAL Spiralbohrer haben eine apikale Überlänge (bis zu 0.5 mm) im Vergleich zur Insertionstiefe des Implantats.



TISSUE LEVEL RP TAPERED | Implantat Ø 4.1 mm

Schritt 1 - Implantattyp

Die Auswahl vom Implantattyp und Implantatdurchmesser sollte vor der ersten Bohrung erfolgen. Die Gewebetiefe wird mit einer Gewebesonde gemessen.

Schritt 2A/2B - Basispräparation

Eröffnung der Gingiva mittels Schnitt zur Erzeugung eines Lappens, so dass eine visuelle Inspektion des Alveolarkamms gewährleistet ist.

Schritt 3 - Markierung der Implantatposition

Zur Markierung der Implantatposition kann der Rosenbohrer Ø 2.2 mm (Ref. 31061) mit max. Drehzahl von 800 min⁻¹, unter Kühlung verwendet werden. Optional kann auch der Pilotbohrer Ø 1.54 mm (Ref. 11594) verwendet werden.

Schritt 4 - Bohrung

Die erste Osteotomie wird mit dem Spiralbohrer Ø 2.2 mm (Ref. 38120) bei einer maximalen Drehzahl von 800 min⁻¹ bis zur entsprechenden Präparationstiefe gebohrt.

Schritt 5 - Ausrichtung und Tiefe prüfen

Mit dem Ausrichtungsstift Ø 2.2 mm (Ref. 64566) wird die Implantatachse überprüft und ggf. können Winkelosteotomiekorrekturen während des nachfolgenden Bohrschrittes durchgeführt werden.

Schritt 6 - Bohrung

Bohren Sie mit dem Spiralbohrer Ø 2.8 mm (Ref. 38149) auf die richtige Insertionstiefe bei einer max. Drehzahl von 600 min⁻¹.

Schritt 7 - Ausrichtung und Tiefe prüfen








Die korrekte Insertionstiefe wird mit der Tiefenmesslehre Ø 2.8 mm (Ref. 64567) kontrolliert.

Schritt 8 - Bohrung

Bohren Sie mit dem Spiralbohrer Ø 3.5 mm (Ref. 38135) auf die richtige Insertionstiefe bei einer max. Drehzahl von 500 min⁻¹.

Schritt 9 - Überprüfung der Tiefe

Die korrekte Insertionstiefe wird mit der Tiefenmesslehre Ø 3.5 mm (Ref. 64569) kontrolliert.

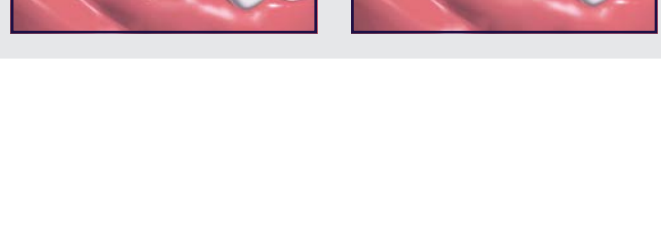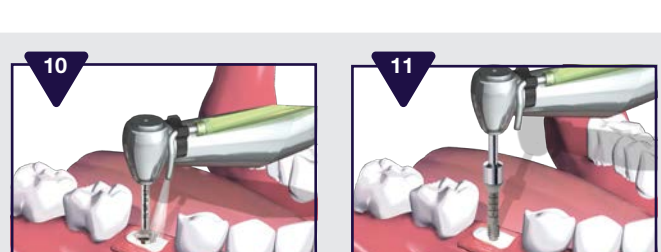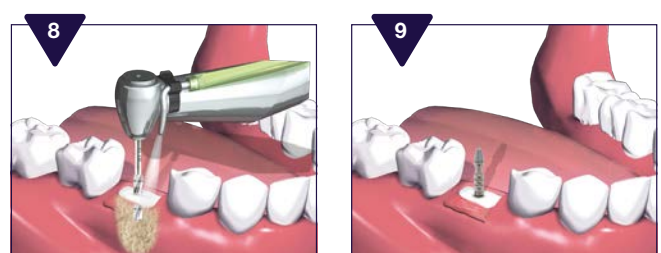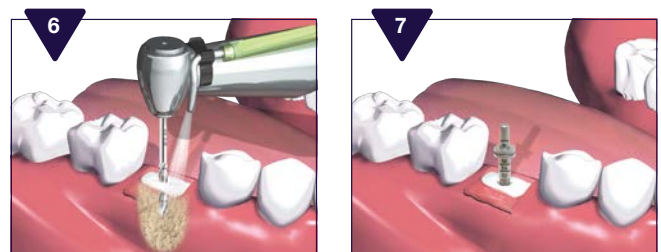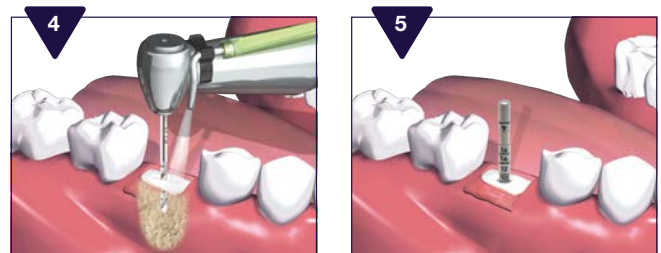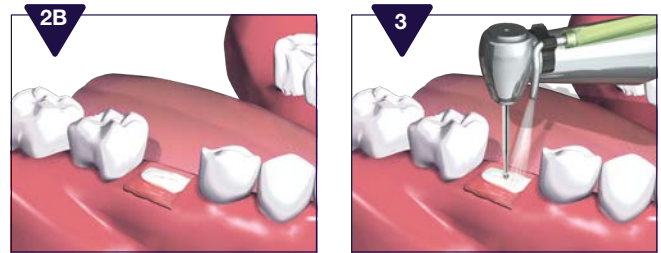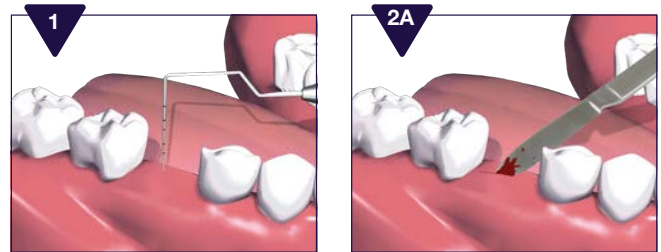

BEI DICHEM KNOCHEN

Schritt 10 - Profilbohrer

Beim Bohren in dichtem Knochen ist der Profilbohrer Ø 4.1 mm (Ref. 38147) für das zu setzende Implantat zu verwenden.

Schritt 11 - Gewindeschneider

Bei dichtem Knochen, ist der Gewindeschneider Ø 4.1 mm (Ref. 95271) zu verwenden.



OKTAGON® TL | IMPLANTATENTNAHME

Schritt 1 - Implantatpackung

Entnehmen Sie die versiegelte Blisterverpackung aus der Außenverpackung. Öffnen Sie die Blisterverpackung durch Abziehen der versiegelten Folie.

Schritt 2 - Adapterauswahl

Setzen Sie den Adapter (manuell oder maschinell) auf die Achtkantschnittstelle des silbernen Transferteils bis ein Klickgeräusch zu hören ist.

Schritt 3 - Lösen des Implantats

Lösen Sie das Implantat aus der Ampulle, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dazu kann der Adapter (manuell oder maschinell) verwendet werden.

Schritt 4 - Entnahme des Implantats

Halten Sie die Ampulle horizontal und entnehmen Sie das Implantat vorsichtig aus der Ampulle.



OKTAGON® TL | IMPLANTATINSERTION

Schritt 1 - Implantatinsertion

Setzen Sie das Implantat mit einer Drehzahl von 15 min^{-1} und einem maximalen Eindrehmoment von 35 Ncm in das vorbereitete Implantatbett ein.

Um eine zu starke Kompression des Knochens zu vermeiden, darf das Eindrehmoment von 35 Ncm nicht überschritten werden.

Schritt 2 - Einsetzen des Implantats

Einsetzen des Implantats bis die Implantatoberfläche vollständig in den Kieferkamm des Knochens positioniert ist.

Sollte das Implantat nicht korrekt inseriert sein, kann das Implantat aus dem Implantatbett wieder herausgedreht werden. Danach ist eine Nachpräparation des Implantatbetts möglich.

Schritt 3 - Entfernen des Adapters

Nach der Insertion kann der Adapter durch eine axiale Aufwärtsbewegung vom Implantat gelöst werden.


Schritt 4 - Lösen des Transferteils

Um eine Krafteinwirkung auf den Kieferknochen zu vermeiden, wird die Anwendung eines des Abziehschlüssels (TL RP/WP Ref. 64565) als Hilfe zum Lösen des silbernen Transferteils empfohlen. Es empfiehlt sich, das silberne Transferteil mithilfe des Adapters (Abb. 4.1) zunächst durch horizontale Bewegung oder minimales Zurückdrehen zu mobilisieren.

Bei höheren Eindrehmomenten empfiehlt es sich das silberne Transferteil (Abb. 4.2) mithilfe des Adapters oder einer Zange zunächst durch horizontale Bewegung oder minimales Zurückdrehen zu mobilisieren.

Schritt 5 - Entfernen des Transferteils

Jetzt kann das silberne Transferteil mittels axialer Aufwärtsbewegung des Adapters oder der Zange gelöst werden.

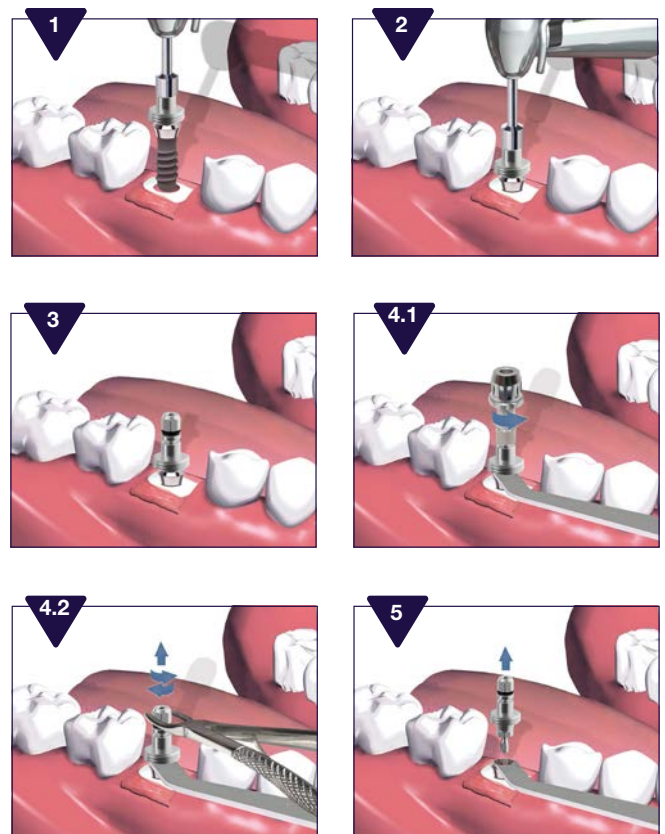

OKTAGON® TL | 48 STUNDEN EXPLANTATIONSINSTRUMENT

WICHTIG

Dieses Instrument kann nur verwendet werden, wenn das silberne Transferteil vorab entfernt wird.

Setzen Sie das 48h Explantationsinstrument korrekt in die Implantatverbindung ein. Sichern Sie das Werkzeug mit der integrierten Schraube, um eine Beschädigung der Innenverbindung des Implantats zu vermeiden.

Jetzt kann das Implantat durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn entfernt werden oder im Uhrzeigersinn auf die richtige Insertationstiefe gebracht werden.



TL RP/WP
(Ref. 64548)





TL RP/WP
(Ref. 64549)

Implantat Position

Bei der Platzierung des Implantats sollte der Zahnarzt die Standardregeln der Implantologie beachten.

Zu berücksichtigen sind, mindestens 1.5 mm Knochen um das Implantat und mindestens 3 mm Knochen zwischen zwei Implantaten, um eine vitale Struktur des Knochens aufrechtzuerhalten.

Nach der Implantation sollten die Implantate von einer facialen und palatalen Knochenschicht von min. 1,0 mm umschlossen sein.

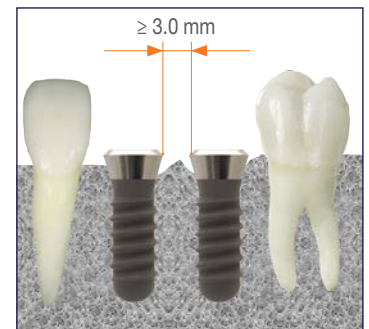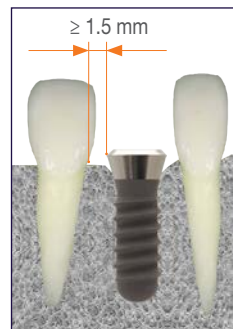

OKTAGON® TL | EINPHASIGE EINHEILUNG

Schritt 1 - Gingivaformer

Wählen Sie den Gingivaformer mit der gewünschten Höhe aus, um ein optimales Emergenzprofil zu erzielen.




Schritt 2 - Platzierung

Der Gingivaformer wird mit max. 15 Ncm (handfest) auf das Implantat mit dem Schraubendreher manuell oder mit dem Winkelhandstück eingedreht.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich vorab, dass die Innenseite des Implantats sauber ist (keine Sekretrückstände).

Schritt 3 - Wundverschluss

Der Wundverschluss erfolgt um den Gingivaformer herum.

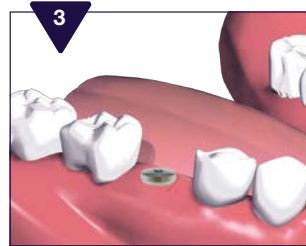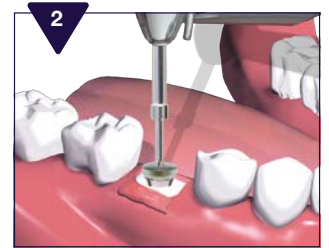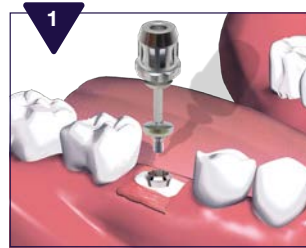

OKTAGON® TL | ZWEIPHASIGE EINHEILUNG

Schritt 1 - Verschlusschraube

In der Implantatverpackung befindet sich eine sterile Verschlusschraube für die zwei-phasige Einheilung.




Schritt 2 - Platzierung

Die Verschlusschraube wird mit max. 15 Ncm (handfest) auf das Implantat mit dem Schraubendreher manuell oder mit dem Winkelhandstück eingedreht.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich vorab, dass die Innenseite des Implantats keine Sekretrückstände aufweist.


Schritt 3 - Osseointegration

Der Nahtlappen über der Verschlusschraube ermöglicht die Heilung des Weichgewebes und die Integration des Implantats.

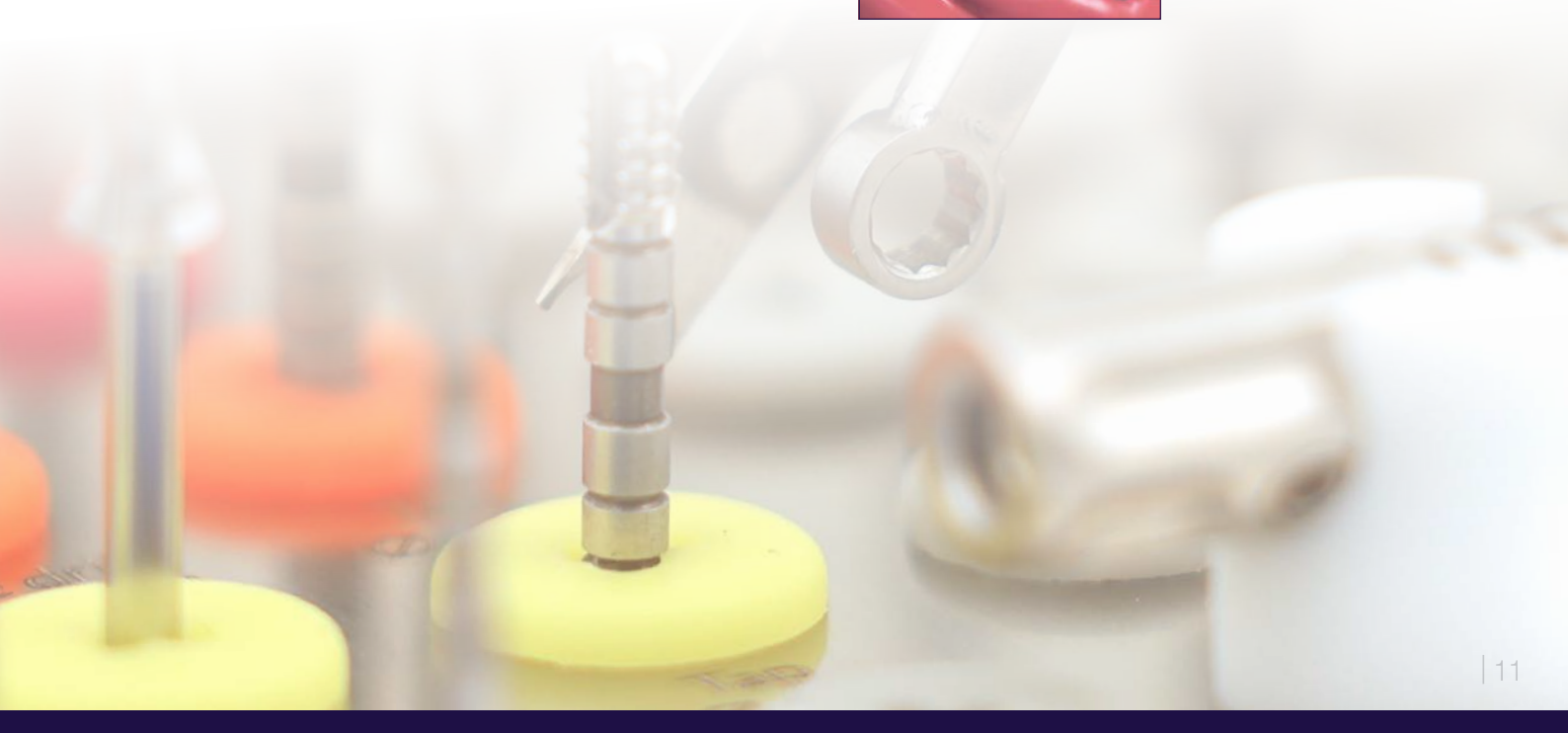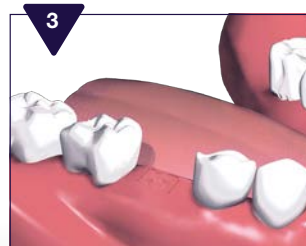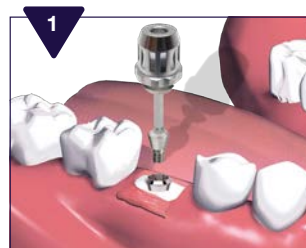

OKTAGON® TL ZUBEHÖR | CHIRURGIE KASSETTE MINI

REF. 82891

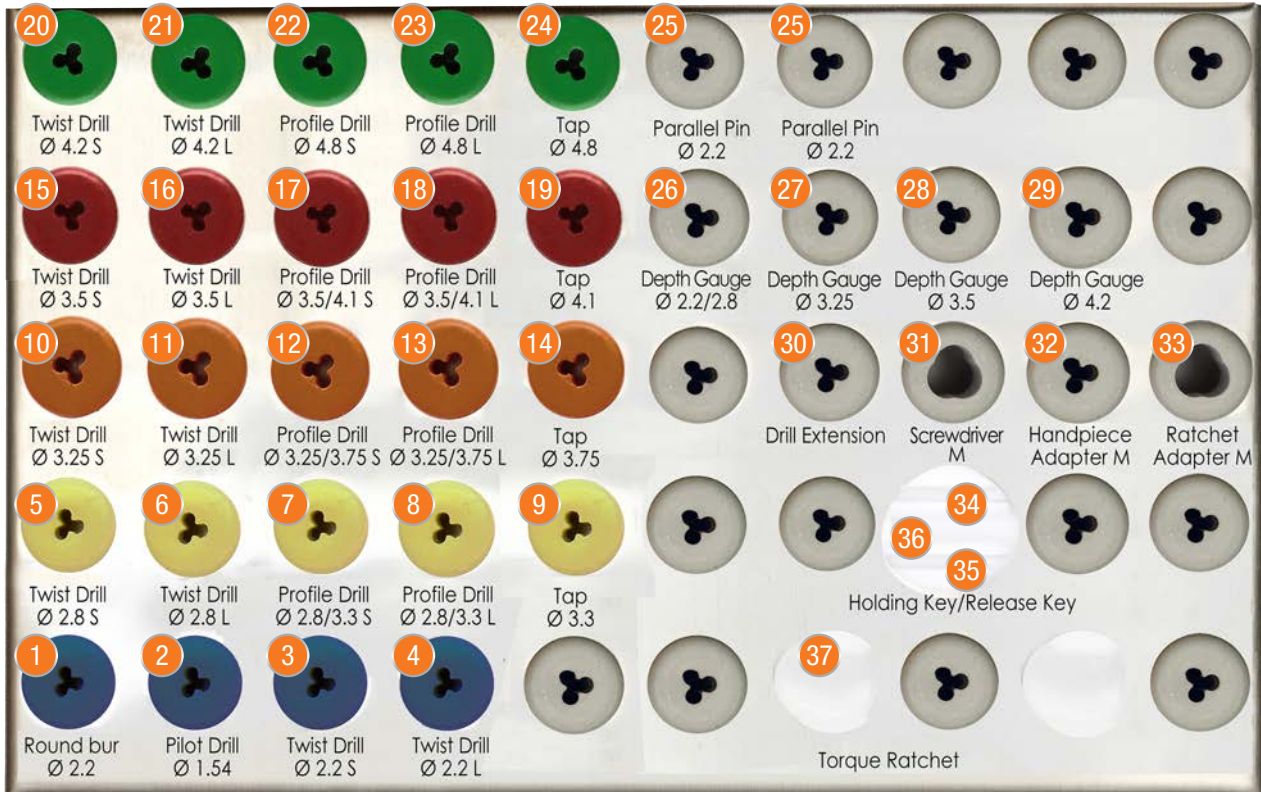

1	31061	TL/BL Rosenbohrer	Ø 2.2	L 34.0
2	11594	TL/BL Pilotbohrer	Ø 1.54	L 33.0
3	38120	TL/BL Spiralbohrer	Ø 2.2	L 33.0
4	38121	TL/BL Spiralbohrer	Ø 2.2	L 41.0

5	38149	TL/BL Spiralbohrer	Ø 2.8	L 33.0
6	38148	TL/BL Spiralbohrer	Ø 2.8	L 41.0
7	38137	TL RP Profilbohrer	Ø 3.3	L 25.0
8	37137	TL RP Profilbohrer	Ø 3.3	L 33.0
9	95270	TL RP Gewindeschneider	Ø 3.3	L 23.0

10	38130	TL/BL Spiralbohrer	Ø 3.25	L 33.0
11	38131	TL/BL Spiralbohrer	Ø 3.25	L 41.0
12	38130	TL RP Profilbohrer	Ø 3.75	L 25.0
13	38131	TL RP Profilbohrer	Ø 3.75	L 33.0
14	38134	TL RP Gewindeschneider	Ø 3.75	L 23.0

15	38135	TL/BL Spiralbohrer	Ø 3.5	L 33.0
16	38136	TL/BL Spiralbohrer	Ø 3.5	L 41.0
17	38147	TL RP Profilbohrer	Ø 4.1	L 25.0
18	37147	TL RP Profilbohrer	Ø 4.1	L 33.0
19	95271	TL RP Gewindeschneider	Ø 4.1	L 23.0

20	38151	TL/BL Spiralbohrer	Ø 4.2	L 33.0
21	38152	TL/BL Spiralbohrer	Ø 4.2	L 41.0
22	93738	TL WP Profilbohrer	Ø 4.8	L 25.0
23	92738	TL WP Profilbohrer	Ø 4.8	L 33.0
24	95272	TL RP/WP Gewindeschneider	Ø 4.8	L 25.0

25	64566	OKTAGON® Ausrichtungsstift	Ø 2.2	L 27.0
26	64567	OKTAGON® Tiefenmeßlehre	Ø 2.2/2.8	L 27.0
27	64568	OKTAGON® Tiefenmeßlehre	Ø 3.25	L 27.0
28	64569	OKTAGON® Tiefenmeßlehre	Ø 3.5	L 27.0
29	64570	OKTAGON® Tiefenmeßlehre	Ø 4.2	L 27.0
30	31050	TL/BL Bohrererlängerung		L 30.0
31	64551	Schraubendreher einteilig		L 24.0
32	31056	Adapter für Winkelstück		L 19.0
33	64558	Adapter für Ratsche		L 11.0
34	64564	BL NC Abziehschlüssel		
35	64565	TL RP/WP BL RC Abziehschlüssel		
36	64563	Halteschlüssel		
37	89048	Drehmomentratsche		


Beispiel zur Ausstattung

OKTAGON® TL ZUBEHÖR | DRILL-STOP-CONTROL SET


38171		TL/BL DRILL-STOP-CONTROL SET	Inhalt: je 1 Stk. von Artikel 38160-38168 und 38170		
<i>Nicht geeignet für CONICAL und BLT Implantate; Ø 3.75 mm Implantate nur in Verbindung mit Artikel 38159</i>					
38170		Pilotbohrer	Ø 1.8 mm	5 Stk.	L 34.0 mm
38160		TL/BL Spiralbohrer	Ø 2.0 mm		L 34.0 mm
38161			Ø 2.8 mm		
38162			Ø 3.5 mm		
38163			Ø 4.2 mm		
38164		Tiefenstop			L 14.0 mm
38165					L 12.0 mm
38166					L 10.0 mm
38167					L 8.0 mm
38168					L 6.0 mm

OKTAGON® TL ERWEITERUNGEN | DRILL-STOP-CONTROL SET

38158		TL/BL Spiralbohrer	Ø 2.2 mm		L 34.0 mm
38159		TL/BL Spiralbohrer	Ø 3.25 mm		L 34.0 mm
38172		Tiefenstop			L 4.0 mm

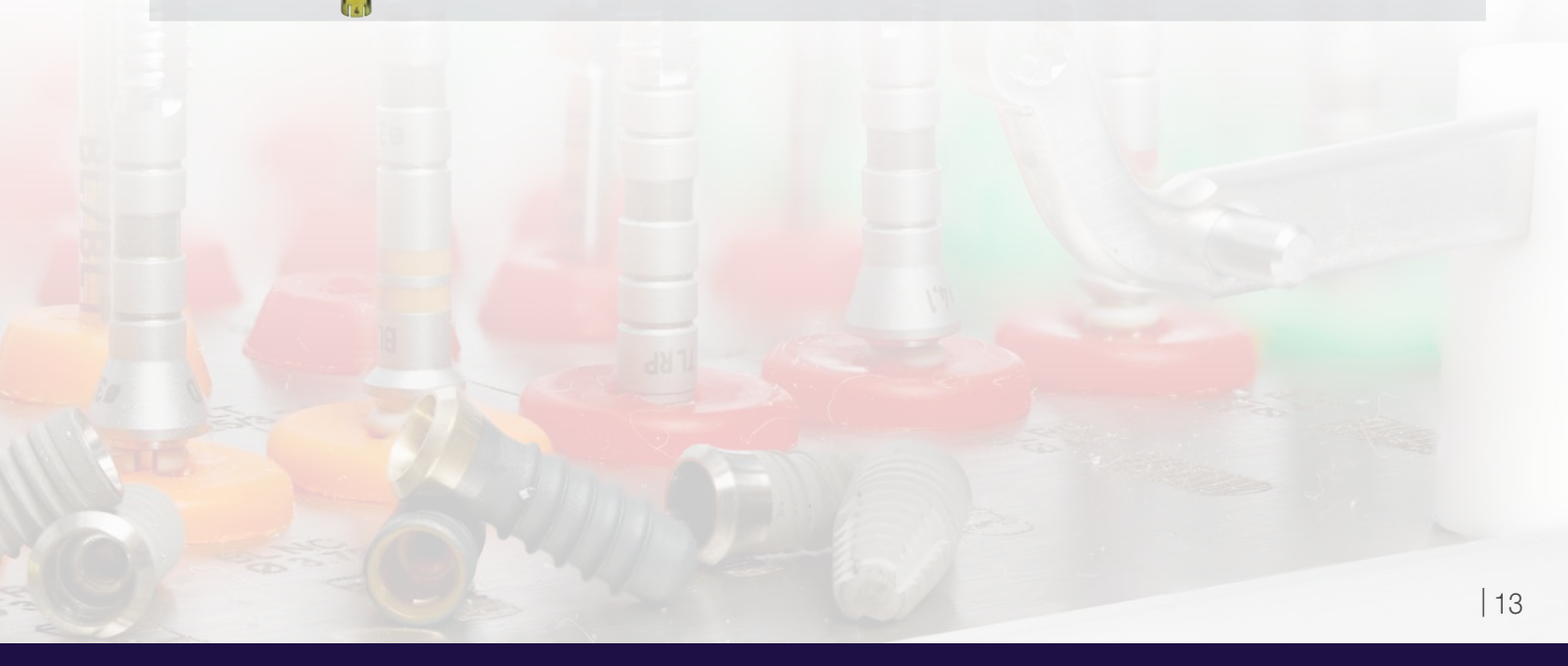

www.meisingerimplants.com

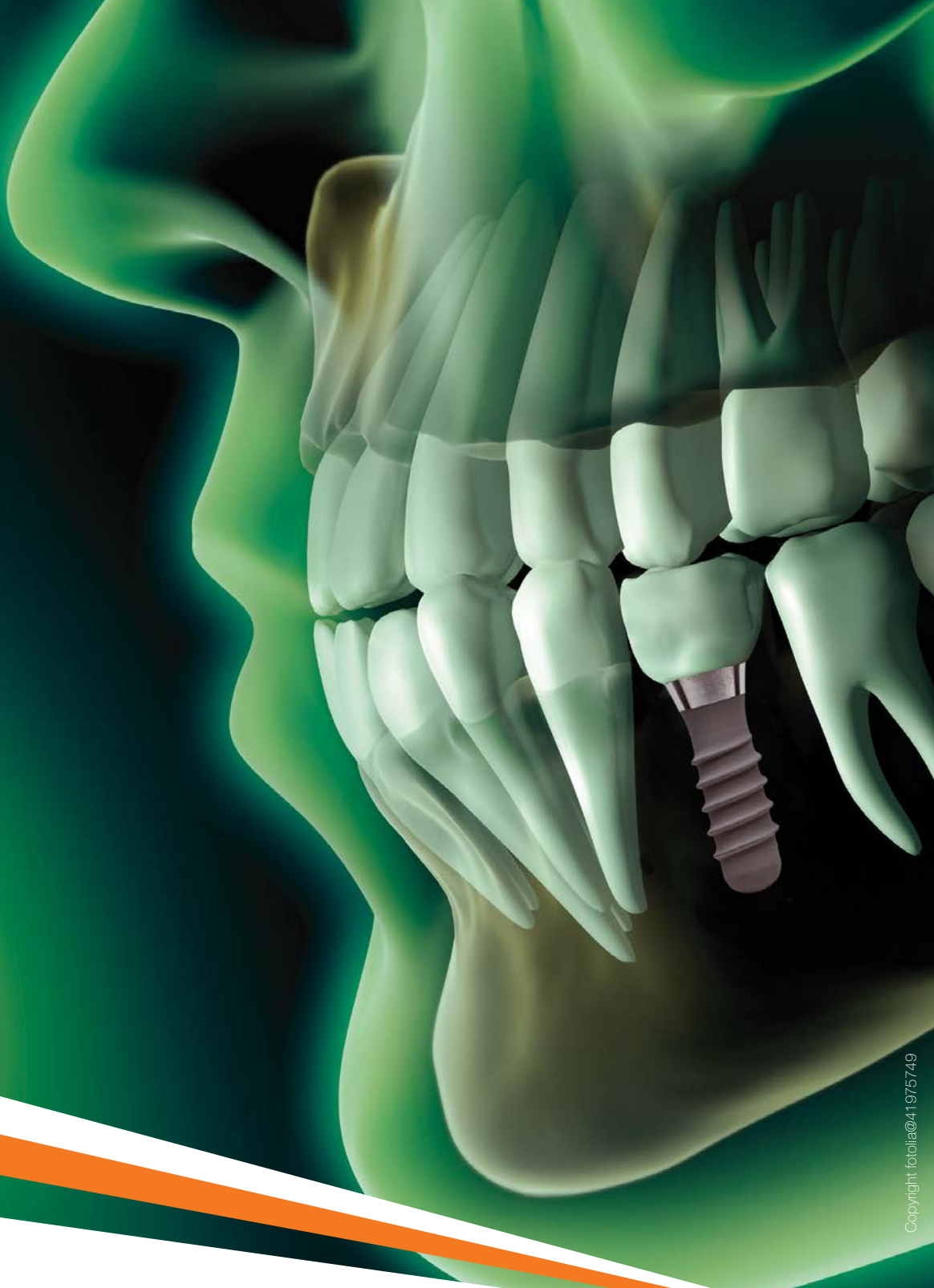

Copyright fotolia@41975749



MEISINGER IMPLANTS

Meisinger Implants GmbH
Hansemannstr. 10
41468 Neuss | Germany

Tel +49 2131 70867-0
Fax +49 2131 70867-99

info@meisingerimplants.com
www.meisingerimplants.com

FDA

Produkte mit „510(k) clearance“ auf Anfrage.



Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstr. 10
41468 Neuss | Germany



CE 0044

Ref. 66001DE
Ausgabe 06/2022